



MTS-ROLLER
MICRONEEDLE THERAPY SYSTEM



МЕДИЦИНСКИЙ МИКРОНИДЛИНГ
МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

CLINICAL RESOLUTION 

CLINICAL RESOLUTION 



MTS-ROLLER
MICRONEEDLE THERAPY SYSTEM



ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ООО «КОРНЕАЛЬ»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

**МЕДИЦИНСКИЙ МИКРОНИДЛИНГ И ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
СРАВНЕНИЯ. ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ».**

- Научно обоснованные результаты
- Ожидания и практика
- Рекомендации по проведению лечения и протоколы
- Условия синергетического лечения
- Показания и противопоказания
- Препараты, разработанные для микронидлинга
- Клинические программы

**МАСТЕР-КЛАСС
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО
МИКРОНИДЛИНГА
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ И
ЛЕЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ**

Предварительная запись на обучающие семинары обязательна по телефонам:
+7(495) 664 2527, +7(495) 664 2529

Семинары проводятся по адресу: г. Москва, Садовническая наб., д. 17, офис 105

CLINICAL RESOLUTION LABORATORY

Clinical Resolution Laboratory, Inc. (Калифорния, США), занималась разработкой и производством препаратов для ухода за кожей и космецевтикой на мировом рынке с 2000 года. В последние годы компания проводила клинические исследования MTS-Роллеров - нового, запатентованного косметологического инструмента, представленного целевой аудитории Соединенных Штатов Америки, Европы и Азии.

Миссия

Предвосхищая развитие рынка, создавать и привносить инновации; предлагать эксклюзивные косметические продукты клинического качества для дерматологов и профессионалов эстетической медицины.

Продукты и услуги

MTS-Роллер - ключевой продукт для торговой марки Microneedle Therapy System. MTS - полноценный терапевтический комплекс, в котором используется несколько запатентованных инновационных технологий в омоложении кожи, лечении шрамов и восстановлении роста волос у мужчин и женщин.

Линия космецевтики включает в себя широкий спектр качественно новых в использовании средств в форме кремов, сывороток, масок и лосьонов, главным образом, для омоложения кожи и восстановления роста волос.

Компания заработала отличную и устойчивую репутацию в области разработки и производства многих ведущих мировых космецевтических марок.

Наши обязательства

Наши обязательства обеспечиваются непревзойденными научными исследованиями препаратов для косметологии, нутрицевтики и препаратов для персонального использования. Clinical Resolution Laboratory также является единственным в мире разработчиком и владельцем марки MTS-ROLLER - уникального запатентованного инструмента для клинических процедур, разработанного для использования профессионалами и имеющего множество назначений для оздоровления кожи, восстановления тканей и ухода за волосами.

Растворы для кожи от Clinical Resolution Laboratory являются результатом многолетних крупных научных исследований, проходивших под наблюдением ведущих ученых и терапевтов этой сферы, а также специалистов независимых лабораторий и университетов США.

Базируясь в Калифорнии (США), компания продолжает опережать новые технологии и быстро вводить новые продукты на рынок здравоохранения. Мы уверены, вас порадуют и взволнуют наши продукты, так как это - Clinical Resolution Laboratory.

Нашей целью всегда останется разработка космецевтических и нутрицевтических решений, отличных от всего, что вы можете найти на рынке.

ЧТО ТАКОЕ МИКРОНИДЛИНГ?

Как работает система лечения микроиглами?




В основе системы лечения микроиглами (MTS) лежит запатентованный MTS-Роллер – уникальный, получивший регистрацию FDA, медицинский инструмент, идеально подходящий для нехирургического и неабляционного лечения кожи при различных показаниях: возрастные изменения (морщины, растяжки), рубцы (акне, хирургические) и гиперпигментация. Клинические исследования показали, что MTS (система лечения микроиглами) является более эффективным видом лечения, чем абляционные виды лечения, такие как лазерная шлифовка, дермабразия и химический пилинг; и так же эффективна, как и неабляционное лечение CO₂ лазером и методикой Fraxel для стимуляции выработки коллагена и эластина, для уплотнения кожи, а также для уменьшения количества морщин и разглаживания шрамов.

Абсолютная абсорбция

MTS-Роллер содержит 200 тончайших иглоочек для контролируемого ранения кожи. Это стимулирует производство коллагена/эластина. Образованные в результате микроканалы служат для проведения терапевтических сывороток и великоколепного впитывания, увеличения общей эффективности. Клинические исследования в Европе, США и Южной Корее доказали:

- при использовании MTS-Роллера абсорбция сыворотки увеличивается до 1000 раз;
- лечение MTS-Роллером более эффективно для уплотнения кожи, чем процедуры фотоомоложения.

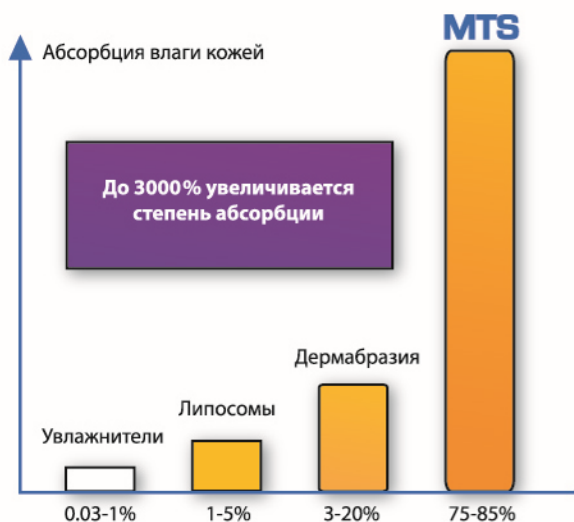


Три основных преимущества при использовании MTS-Роллеров

- Мезороллеры MTS – революционны. Они производят ту же работу, что и лазеры и прочие абляционные методы, увеличивая продукцию коллагена, но с минимальным повреждением защитного слоя кожи.
- Мезороллеры MTS – эффективны. Фактически, и будучи так же эффективны, как и лазеры, IPL, термаж и прочие аппаратные методики, мезороллеры MTS уменьшают стоимость процедуры и для врача, и для клиента.
- Мезороллеры MTS – безопасны. «Нехирургический и неабляционный» означает более деликатное и дружественное по отношению к коже воздействие. Пациенты в небольшой степени или совсем не испытывают болезненных ощущений и свободны от риска осложнений.

Быстрое восстановление

Деликатное влияние, производимое MTS-Роллером намного более «дружелюбно» по отношению к коже, таким образом, эффективнее других инвазивных и более дорогих методов лечения кожи. MTS-Роллер не разрушает эпидермальный барьер; микро-каналы, созданные 200 иглами, закрываются в течении нескольких часов после процедуры, достаточно долгой для образования внутри кожи новых коллагеновых структур и достаточно короткой для того, чтобы позволить пациенту быстро вернуться к своей обычной жизни. MTS-Роллеры исключают все часто встречающиеся побочные эффекты и риски, ассоциируемые с химическими пилингами, дермабразией и лазерной шлифовкой. В короткие сроки кожа уплотняется, становится подготовленной к дополнительному лечению. Модели MTS-Роллера для домашнего использования (CR2, CR3) безболезненны; модели для профессионального использования (CR5, CR10, CR20, CR30) необходимо использовать вместе с местной анестезией.

Как работает система терапии микроиголами (MTS)

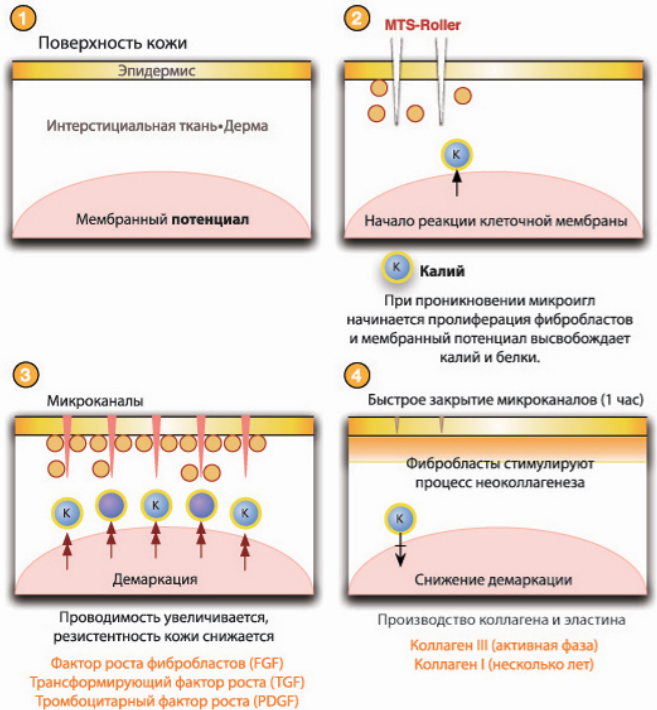

Медицинский роллер

CR20 - 2.0 мм

- Индукция коллагена
- Улучшение состояния рубцов после акне
- Лечение целлюлита
- Удаление глубоких шрамов

Медицинский роллер

CR10 - 1.0 мм

- Уплотнение кожи
- Улучшение состояния рубцов после акне
- Уменьшение морщин
- Лечение растяжек
- Лечение пигментации

Для эстетистов

CR5 - 0.5 мм

- Омоложение кожи
- Улучшение состояния рубцов после акне
- Лечение растяжек
- Лечение пигментации
- Разглаживание морщин

Персональный роллер

CR3 - 0.3 мм

- Улучшение состояния рубцов после акне
- Восстановление кожи
- Лечение алопеции
- Домашний уход
- Увеличение прочности кожи

Персональный роллер

CR2 - 0.2 мм

- Домашний уход
- Доставка ингредиентов
- Улучшение состояния кожи
- Омоложение
- Увеличение прочности кожи



Каталог продуктов MTS-Roller и Clinical Resolution

- MTS-ROLLER / MTS-Роллер для терапии микроиглами
- VITAL W / MTS Мезораствор анти-возрастной
- VITAL WH / MTS Мезораствор репаративный
- VITAL PS / MTS Мезораствор для борьбы с пигментацией
- VITAL HR / MTS Мезораствор для роста волос
- VITAL SM / MTS Мезораствор против растяжек
- VITAL CL / MTS Мезораствор антицеллюлитный
- PEPTIDE AQUA GEL MASK / MTS Пептидно-аквагелевая маска
- STEM CELL / PEPTIDE / EGF / MTS Необходимый уход при прохождении процедур MTS-Роллером
- MTS SUN PROTECTIVE CREAM / MTS солнцезащитный крем
- MTS STERILIZING SOLUTION / MTS Стерилизующий раствор для мезороллеров MTS
- MTS ANTI-AGING COMPLEX / MTS Анти-возрастной комплекс
- MTS HAIR RESTORATION COMPLEX / MTS Комплекс для восстановления волос
- MTS HR MATRIX / MTS Пептидный лосьон для восстановления роста волос
- MTS LASHPEP / MTS Кондиционер для ресниц
- POREX MASK / MTS Органическая маска для сужения пор/отшелушивающая маска
- MTS VITAPEP SERUM / MTS Сыворотка с витапептидами
- MTS PEPTIDE MOISTURIZER / MTS Пептидный увлажняющий крем
- MTS NUMB MASTER / MTS Крем для местной анестезии

MTS-ROLLER

Роллер для терапии микроиглами



1 Тип продукта/информация

Инструмент для терапии микроиглами

Возможная длина иглы: 0,2 мм, 0,3 мм, 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм

2 Описание

Процедура терапии микроиглами стимулирует кожу к неокollaгенезу, таким образом, сокращая морщины и улучшая текстуру кожи. Роллер с очень тонкими иглами разработан для того, чтобы создавать в коже множество микроскопических каналов (более 200 000 за одну процедуру). Эти каналы заметно улучшают проникновение терапевтически активных ингредиентов, таких как: полипептиды, факторы роста, витамины или любых других. Уход MTS-Роллером стимулирует обновление кожи, таким образом, позволяет коже выглядеть свежее и моложе. Эффект терапии микроиглами отличается от искусственных инъекций коллагена, так как эффект индуцирования синтеза коллагена при микроиндлинге обладает более длительным эффектом.


MTS-Роллер - высококачественный точный инструмент. Барабан и ручка изготовлены из лексан-поликарбонатной смолы. Ось изготовлена из полированной нержавеющей стали. Запатентованный процесс изготовления располагает иглы строго на расстоянии 0,02 мм от основания оси барабана. Все роллеры имеют голограмму и уникальный серийный номер, контролирующий качество продукции.

3 Ключевые преимущества

- Лечение практически безболезненно
- Побочных эффектов не выявлено
- Высокоточный, сделанный в Германии инструмент, которого хватит на сотни процедур
- Процесс стимулирует физиологическую реакцию кожи с высвобождением собственных факторов роста

4 Показания по применению

Поделите зону процедуры на секции, например: лоб, нос, щеки, зону губ и зону шеи. Используйте MTS-Роллер с равномерной силой давления на кожу. Прокатывайте роллер по поверхности вертикально, горизонтально и по диагоналям (согласно инструкции).

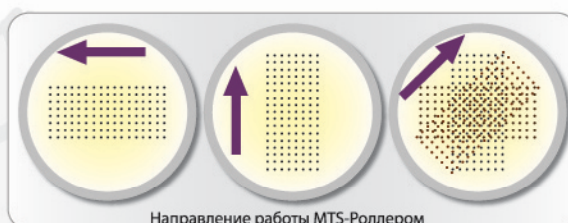

5 Меры предосторожности

Храните в недоступном для детей месте.

VITAL W

Мезораствор Анти-возрастной



Состав: Гиалуронат натрия (основа), деионизированная вода, гель алоэ вера, ацетил гексапептид-3, матриксил 3000, эпидермальный фактор роста, витамин B5, DMAE, пентаксил, феноксизтанол, аскорбил фосфат магния, пальмитоил трипептид-28, АЕ Protek NPB.

Применение: Нанесите мезораствор на всю площадь лечения до, во время и после микронидлинга. Аккуратно массируйте, пока мезораствор не впитается. Для более подробной информации о проведении процедуры мезотерапии с использованием MTS-Роллера посмотрите обучающее видео или используйте пакетный протокол MTS-Roller.

Меры предосторожности: Только для профессионалов и для наружного использования.

Основные преимущества Vital W:

- Активное омоложение
- Глубокое увлажнение клеток кожи
- Уменьшение количества и видимости морщин, благодаря уплотнению кожи и увеличению уровня производства коллагена
- шелковистая, гладкая текстура кожи
- Прекрасно подходит для любого типа кожи, не имеет побочных эффектов

Гиалуроновая кислота с ее весом в 1Mda является одним из наиболее эффективных увлажнителей для кожи, а так же обладает заживляющими и регенерирующими свойствами. Интенсивно увлажняет кожу вне зависимости от атмосферной влажности.

Ацетил Гексапептид-3 в данном мезорастворе работает по уникальной схеме, благодаря которой расслабляются мышцы лица. Это приводит к редукции поверхностных морщин при регулярном использовании. Эффект значительно улучшается при использовании в процедуре MTS-Роллера.

Матриксил-3000 действует как средство от морщин с эффектом лифтинга. В то же время является активатором кожной реструктуризации и восстановления. Благодаря этому активизируется обновление и неосинтез внеклеточного матрикса и клеточная пролиферация.

Пентаксил заживляет раны и помогает в уменьшении морщин путем увеличения уровня производства коллагена в коже, стимулируя кожные процессы регенерации, улучшая выработку протеина и коллагена в подкожных слоях.

EGF стимулирует рост эпидермальных и эпителиальных тканей в естественных и лабораторных условиях, а также фибробластов в клеточной культуре.

Витамин B5 задерживает воду в коже после процедуры микронидлинга. Топически применяемый витамин B5 в различных формах является благотворным для улучшения текстуры и функций кожи.

DMAE - естественная субстанция, называемая «впечатляющим лифтингом», благодаря удивительной способности значительно подтягивать, укреплять кожу, а также улучшать тон кожи шеи и лица, делает кожу более эластичной, упругой и выглядящей моложе. Эта способность укрепления и стабилизации клеточной мембраны позволяет улучшать даже самые невосприимчивые области.

Аскорбил фосфат магния является улучшенной модификацией витамина С, но более стабильной, чем аскорбиновая кислота. Этот компонент часто используется для защиты от УФ-лучей и восстановления, выработки коллагена, осветления и освежения кожи, в качестве противовоспалительного средства. Также является потенциальным антиоксидантом.

Пальмитоил трипептид-28 - стабилизированный пептид, разработанный для питания кожи, является устойчивым к разрушению энзимами. Имитирует действие TGF-β путем активации рецептора типа II (TβRII) трансформирующего фактора роста-ββ для активации синтеза коллагена. В результате, уменьшает морщины, увеличивая уровень коллагена в коже. Работает, включая ген, ответственный за производство коллагена.

- 45% уменьшения морщин за 28 дней (in-vivo)
- 152% увеличение синтеза коллагена I (in-vitro)
- 175% увеличение III коллагенового синтеза (in-vitro)
- 48% ингибирование MMP-9 (in-vitro)



Мезорастворы для MTS микронидлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микронидлинга

- 1 Vital W - Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS - Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM - Лечение растяжек
- 4 Vital WH - Заживление ран
- 5 Vital CL - Контроль целлюлита
- 6 Vital HR - Формула восстановления волос

VITAL WH

Мезораствор репаративный



Ингредиенты: Алоэ вера гель, пропиленгликоль, ланолин, Imperata cylindrica (экстракт корня) (и) вода (и) глицерин, (и) PEG-8 (и) карбомер), MTS бета глюкан, MTS пептид 222, MTS пептид 225, MTS пептид 230, пальмитоил трипептид-28, VEGF, PDGF, bFGF, комплекс витаминов В (В1, В2, В3, В5, В6, В12), витамин Е (D-α токоферол), бета каротин, карнозин, L-аргинин, глюкозамин хондроитин сульфат, жирные кислоты омега-3, пчелиный прополис, актиплекс 221, актиплекс 224, экстракт морских водорослей, мед, экстракт зеленого чая, экстракт виноградных косточек.

Применение: Нанесите необходимое количество мезораствора на всю площадь лечения до и после использования мезороллера.

Предосторожности: Прервите использование при появлении раздражения или развивающегося покраснения кожи.

Ключевые преимущества:

Данный мезораствор не только помогает в заживлении любых открытых ран, но также формирует антитела, помогающие организму бороться с патогенными бактериями и вирусами. Дополнительно увлажняет, тем самым, играет важную роль в процессе заживления ран. Увлажненные раны преимущественно заживают быстрее с меньшим риском образования шрамов. Все заживляющие ингредиенты в составе данного мезораствора помогают добиться достаточной гидратации после процедуры микронидлинга и активной репарации.

Ланолин: максимально очищенный и косметически активный. Представляет новый золотой стандарт в процессе заживления поверхностных ран.

Imperata cylindrica (экстракт корня) (и) Вода (и) глицерин (и) PEG-8 и карбомер активируют увлажнение клеток кожи, тем самым поддерживая ее гидробаланс на протяжении всего дня.

MTS Бета Глюкан стимулирует иммунную систему, способствует клеточному росту и синтезу коллагена. Омолаживает кожу, а так же заживляет раны и делает шрамы менее заметными.

Пальмитоил трипептид-28 стабилизированный пептид, разработанный для питания кожи, является устойчивым к разрушению энзимами. Имитирует действие TGF-β путем активации рецептора типа II (TβRII) трансформирующего фактора роста- ββ для активации синтеза коллагена. В результате, уменьшает морщины, увеличивая уровень коллагена в коже, включая ген, ответственный за производство коллагена.

- 45% уменьшения морщин за 28 дней (in-vivo)
- 152% увеличение синтеза коллагена I (in-vitro)
- 175% увеличение III коллагенового синтеза (in-vitro)
- 48% ингибирование MMP-9 (in-vitro)

MTS Пептид 222, MTS Пептид 225, MTS Пептид 230:

- стимулируют и регулируют пролиферацию клеток и коллагенез
- Ремоделирование матрикса кожи, восстановление тканей, заживление ран
- стимулируют синтез FGFA (FGF1) – кислотный фактор роста фибробластов, FGFb (FGF2) – основной фактор роста фибробласта, FGF3 – фактор роста фибробластов 3, FGF7 – фактор роста фибробластов 7 (фактор роста кератиноцитов), CTGF – фактор роста соединительной ткани, VEGFc – васкулярно-эндотелиальный фактор роста C, PDGFc – тромбоцитарный фактор роста C, GRN – гранулин.

VEGF: Васкулярно-эндотелиальный фактор роста провоцирует размножение эндотелиальных клеток и перемещение их в зону заживления раны. Секреция этого фактора роста может быть произведена различными видами клеток, включая кератиноциты, макрофаги, фибробласты и эндотелиальные клетки, в основном в гипоксических условиях.

PDGF: Тромбоцитарный фактор роста - один из самых маленьких выделенных протеинов. Данный фактор роста позволяет клеткам соединительной ткани (фибробластам) делиться и стимулирует клетки соединительной ткани и клетки гладкой мускулатуры активно пролиферировать в области ранения и закрывать поврежденную область.

bFGF: основной фактор роста фибробластов отвечает за первичную стимуляцию миграции и пролиферации эндотелиальных клеток в регенерирующих тканях. Также он стимулирует пролиферацию клеток и находится преимущественно в ранней фазе ранения.

Витамин Е (D-α токоферол), β-каротин, карнозин, L-аргинин, глюкозамин, хондроитин сульфат, омега-3 жирные кислоты, пчелиный прополис, актиплекс 221, актиплекс 224, экстракт водорослей, мед, экстракт зеленого чая облегчают процесс заживления ран.



Мезорастворы для MTS микронидлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микронидлинга

- 1 Vital W – Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS – Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM – Лечение растяжек
- 4 Vital WH – Заживление ран
- 5 Vital CL – Контроль целлюлита
- 6 Vital HR – Формула восстановления волос

VITAL PS

Мезораствор для борьбы с пигментацией



Ингредиенты: Сертифицированная органическая вода алоэ, L-глутатион, деионизированная вода, стабилизированная L-аскорбиновая кислота, тетрагексилдецил аскорбат, комплекс витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В12), аскорбил фосфат магния, альфа арбутин, жирорастворимый экстракт лакричника, экстракт *Palmaria palmata*, азелаиновая кислота, экстракт шелковицы, фенокситанол, ретинол (10000 I.U/g), койевая кислота, AE Protek NPB.

Инструкция по применению: Нанесите мезораствор на всю область лечения до и после процедуры микронидлинга, уделяя особое внимание возрастным пятнам, участкам с меланодермией, постлазерной гиперпигментацией; эритемой, спровоцированной лазером; зоны воспаления и воздействия свободных радикалов, проблем с пигментацией, наблюдаемых ранее и не связанных с лазерным лечением. Рекомендуется использовать мезороллеры CR3 и CR5.

Меры предосторожности: Избегайте контакта с глазами и слизистой. Только для наружного применения.

Основные ингредиенты и их ключевые преимущества:

Л-Глутатион: Маленькие молекулы, включающие в себя аминокислоты и анти-оксиданты, естественно производимые организмом (анти-оксиданты и детоксиканты организма). Это маленькая молекула белка, состоящая из аминокислот цистеина, глицина и глутаминовой кислоты, известна как «Главный» Антиоксидант. Также она известна как нейтрализатор метаболитов организма и регулятор деятельности менее значимых антиоксидантов, таких как витамин С и Е. Глутатион в увеличенной дозе помогает отбеливать кожу с помощью конверсии эумеланина (темного/коричневого/желтого пигмента) в феомеланин (красновато-желтый пигмент). Именно по этой причине и происходит осветление кожи. Все результаты проверены и доказаны на безопасность и эффективность, широко используются дерматологами.

Стабилизированная L-Аскорбиновая кислота: Мощный антиоксидант; дополнена системой микро-доставки. Стимулирует выработку коллагена, защищает кожу от солнца, осветляет возрастные пятна, обесцвечивает рубцы, таким образом, следы от солнечных ожогов и веснушки становятся менее заметными и буквально сравниваются с тоном лица. Новообразованный коллаген и эластин делают кожу более упругой и позволяют ей выглядеть моложе. Очищает и сужает поры, является «незаменимым кофактором» для синтеза 2-х энзимов (лизилгидроксилазы и полигидроксилазы), которые в свою очередь катализируют продукцию аминокислот, необходимых для производства коллагена - первичной соединительной ткани кожи.

Тетрагексилдецил аскорбат: Абсолютно стабильный, жирорастворимый сложноэфирный витамин С. Имеет антиоксидантную активность, ингибирует липидную перекисидацию. Местное использование может смягчить негативное влияние УФ-лучей солнца. Исследования показали, что он стимулирует выработку коллагена. Также, осветляет кожу с помощью ингибирования меланогенеза

(производство пигмента), тем самым, способствуя более ровному тону кожи. В отличие от аскорбиновой кислоты, данный компонент не раздражает кожу и не дает эффекта шелушения.

Комплекс витаминов В (В1, В2, В3, В5, В6, В12) повышает иммунитет и осветляет тон кожи.

Витами Е (в качестве D-альфа токоферола) - жирорастворимый витамин-антиоксидант, помогает нейтрализовать потенциальный вред свободных радикалов внутри организма. Существует в восьми различных формах. D-альфа-токоферол является самой активной формой и одним из мощнейших биологических антиоксидантов.

Аскорбат кальция коммерчески известен как эфир витамина С. Является более стабильной формой витамина С.

Жирорастворимый экстракт солодки отвечает за отбеливание кожи; известен как глабридин. Глабридин борется с пигментацией путем предупреждения деятельности тирозиназы. Исследования показали, что данный ингредиент обладает осветляющим эффектом. В то же время, не обладает токсичностью для меланоцитов.

Койевая кислота активно используется в качестве натуральной альтернативы гидрохинону. Койевую кислоту получают из грибов. Исследования показали, что она эффективна в качестве осветляющего агента, ингибирующего производство меланина.

Ретинол (10000 I.U/g) - омоложение и осветление кожи.

Альфа арбутин - натуральный осветляющий/отбеливающий агент. Он действует путем медленного высвобождения гидрохинона посредством гидролиза, который, в свою очередь, блокирует действие тирозиназы и уменьшает производство меланина (пигментация) в коже.

Магний аскорбил фосфат: является улучшенной модификацией витамина С, но более стабильный, чем аскорбиновая кислота. Этот компонент часто используется для защиты от УФ-лучей и восстановления, выработки коллагена, осветления и освежения кожи, и в качестве анти-воспалительного средства. Также является мощным антиоксидантом.

Экстракт *Palmaria palmata* ингибирует синтез меланина. Ограничивает его миграцию к поверхности кожи, тем самым контролируя фотоспровоцированную пигментацию. Благодаря этому кожа выглядит сияющей и ультрачистой.

Азелаиновая кислота и экстракт шелковицы - эффективные отбеливающие средства, известные благодаря депигментирующим свойствам.



Мезорастворы для MTS микронидлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микронидлинга

- 1 Vital W - Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS - Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM - Лечение растяжек
- 4 Vital WH - Заживление ран
- 5 Vital CL - Контроль целлюлита
- 6 Vital HR - Формула восстановления волос

VITAL HR

Мезораствор для роста волос



Ингредиенты:

Вода, экстракт водорослей, неорганические соединения серы, силанедиол салицилат, бутиленгликоль, экстракт плодов *Spondias amara*, экстракт листьев/семян/цветов *Celastrus paniculata*, гомотаурин, экстракт папоротника *Adiantum*, экстракт кожуры картофеля, феноксиэтанол, гидролизированные молочные протеины, пропиленгликоль, гидролизированные гликозаминогликаны, коллоидная сера, масло кожуры горького апельсина, экстракт листьев ежевики, экстракт хны, экстракт листьев *Barosma betulina*, пентапептид-5; (лейцин, пролин, лизин, глутамин, аспартамовая кислота, аланин), глицерин, масло семян *Melia azadirachta*, цинк, экстракт карликовой пальмы, триэтаноламин, калия сорбат, натрия бензоат.

Применение:

Нанесите мезораствор на область лечения. Втирайте в кожу головы в течение 2-3 минут. Используйте мезораствор для роста волос до, во время и после процедуры микронидлинга. После процедуры, оставьте средство на голове для впитывания примерно на 4 часа до мытья головы. После процедуры микронидлинга, вы можете нанести на кожу головы MTS HR Complex.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте обильным количеством воды.
- При появлении раздражения или сильного покраснения прекратите использование.

Ключевые преимущества:

Мезораствор для роста волос - это результат особых научных исследований биохимических сигналов, контролирующих процесс роста волос. Данный препарат является самым последним словом в технологии восстановления роста волос как для женщин, так и для мужчин.

- Направленно стимулирует фазу анагена (активного роста) с активацией необходимых для волос молекул-факторов роста.
- Направленно укорачивает фазы катагена и телогена (фазы инволюции и покоя в жизненном цикле волосяного фолликула).
- Косвенно останавливает телогеновое выпадение волос.
- Увеличивает микроциркуляцию и улучшает питание волосяного фолликула.
- Контролирует себорею, уменьшая производство кожного сала с помощью коллоидной серы, поддерживая рост волос.
- Уменьшает воздействие дигидротестостерона на волосяную фолликул - основную причину облысения по мужскому типу, также известную как андрогенетическая алопеция.
- Используются липосомы со средними размерами 100-150 Нм, содержащие гомотаурин, для эффективного проникновения активных элементов в зону лечения. Комбинированное применение цикла процедур восстановления волос дает возможность получить быстрые, эффективные и заметные результаты



Мезорастворы для MTS микронидлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микронидлинга

- 1 Vital W - Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS - Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM - Лечение растяжек
- 4 Vital WH - Заживление ран
- 5 Vital CL - Контроль целлюлита
- 6 Vital HR - Формула восстановления волос

VITAL SM

Мезораствор против растяжек



Ингредиенты

Деионизированная вода, гиалуронат натрия, пальмитоил трипептид-28, MTS пептид 225 и MTS пептид 239, MTS бета глюкан, пропиленгликоль, экстракт *Pseudoalteromonas*, гидролизат жмыха тыквенных семян, ацетилтетрапептид-10 и пентапептид-18, гидрокспролилсилан CN, масло семян кофе, хлорелаген DP, морской коллаген, морской эластин, SDA-40 Proof 200, экстракт водорослей, витамин E ацетат, AE Protek.

Применение

Наносите мезораствор на зону лечения до, во время и после процедуры микроиндлинга.

Меры предосторожности

Прекратите использование в случае появления раздражений или покраснения кожи. Не применяйте в области вокруг глаз.

Ключевые ингредиенты и преимущества

Пальмитоил трипептид-28 - стабилизированный пептид, разработанный для питания кожи. Устойчив к разрушению энзимами. Выполняет функции TGF- $\beta\beta$ путем активации рецептора второго типа (T β RII) трансформирующего фактора роста- $\beta\beta$, запуская синтез коллагена. Уменьшает морщины посредством увеличения уровня коллагена в коже и включает ген, отвечающий за производство коллагена.

- 45% уменьшения морщин за 28 дней (in-vivo)
- 152% увеличение синтеза коллагена I (in-vitro)
- 175% увеличение III коллагенового синтеза (in-vitro)
- 48% ингибирование MMP-9 (in-vitro)

MTS Пептид 225 и 239 (10%) активирует ген фактора роста фибробластов. INCI: глицерин, вода, миристоил пентапептид-11. Работает как омолаживающее средство/пептид против морщин, стимулируя клеточную репликацию и выработку коллагена.

MTS Бета Глюкан стимулирует иммунитет и рост фибробластов, а также коллагеновый синтез. Омолаживает кожу, способствует заживлению и уменьшению видимости шрамов.

Ацетил тетрапептид-10 и пентапептид-18 помогает блокировать деградацию внутриклеточного матрикса с помощью ингибирования действия MMP; пентапептид-18,

являясь нейропептидом, вызывает действие, сходное с действием Ботокса.

Гидролизированный тыквенный жмых эффективен в предупреждении и уменьшении видимости растяжек.

Экстракт фермента *Pseudoalteromonas* - экстракт ферментации антарктического Псевдоальтеромонасы NF-3 (*Pseudoalteromonas antarctica*) классифицируется как биологический агент, используемый в качестве увлажнителя и как кондиционирующий кожу агент. Это молекулы гликопротеин трипептида-1, содержащего остатки трех аминокислот: глицина, гистидина и лизина.

- Увеличивает производство коллагена, что позволяет коже выглядеть более здоровой и молодой.
- Уменьшает глубокие и мелкие морщины, позволяя коже выглядеть моложе.
- Ускоряет процесс формирования эластина, для повышения упругости кожи.
- Защищает кожу, от негативных температур, предохраняя ее от стресса, вызываемого неблагоприятными условиями окружающей среды.
- Увеличивает увлажненность кожи.
- Улучшает процессы заживления кожи, для быстрого восстановления при любом повреждении тканей кожи.
- Морской ферментированный экстракт Псевдоальтеромонасы; позволяет улучшить синтез коллагена I и IV типов, а так же эластина.

Масло семян кофе: увеличивает уровень фактора TGF, коллагеновый синтез, синтез эластина, а так же гликозаминогликана (GAG синтез) в 2.5% после 48 часов в условиях клеточной культуры.

Хлорелаген DP: Увеличивает синтез DEJ белков, включая: Ламинин В и В1, Коллагена IV, VII, (DEJ белки) III, и I, Эластана (дермальные протеины). Также стимулирует синтез Элафина, увеличивая ингибирование эластазы для предотвращения деградации эластина.



Мезорастворы для MTS микроиндлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микроиндлинга

- 1 Vital W - Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS - Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM - Лечение растяжек
- 4 Vital WH - Заживление ран
- 5 Vital CL - Контроль целлюлита
- 6 Vital HR - Формула восстановления волос

VITAL CL

Мезораствор антицеллюлитный



Состав

Вода, кальция динатрия этилендиаминтетраацетат, экстракт коры магнолии, бутиленгликоль, гидроксипролилсилан CN, экстракт коры *Machilus thunbergii*, кофеин, экстракт корня иглицы колючей, чайный гидроиодит, экстракт плюща, карнитин, трипептид-1, карагинан, динатрия этилендиаминтетраацетат, экстракт катуабы, экстракт марапуамы, экстракт пфафии, метилсиланол карбоксиметил теофилин альгинат, феноксиэтанол, ксантановая камедь.

Применение

Нанесите мезораствор на всю площадь лечения до и после использования мезороллера. Аккуратно массируйте, пока мезораствор не впитается. Для более подробной информации проведения процедуры мезотерапии с использованием MTS-Роллера посмотрите обучающее видео MTS-Roller или используйте пакетный протокол MTS-Roller.

Меры предосторожности: Только для профессионалов и для наружного использования.

Основные преимущества Vital CL

Кофеин, экстракт корня иглицы колючей, чайный гидроиодит, экстракт плюща, карнитин, трипептид-1, карагинан, динатрия EDTA. В данном мезорастворе эти ингредиенты предлагают комплексный подход, соединяя ингибирование адипоцитов, липолитическую активность, реактивацию микроциркуляции, а также выведение токсинов для максимального эффекта. Все это предоставляет вам уникальное средство для лечения целлюлита.

Трипептид-1 действует как агент, выводящий продукты перекисления липидов, улучшая тем самым эффективность других компонентов, борющихся с целлюлитом и предотвращающих развитие адипоцитов.

Гидроксипролилсилан CN водорастворимое производное

органического силикона, стимулирующее размножение клеток и способное значительно увеличить клеточное обновление.

Экстракт катуабы, экстракт марапуамы, экстракт пфафии содержатся в форме сапонинов и флавоноидов. Наблюдения показывают значительное увеличение высвобождения свободных жирных кислот в культуре человеческих адипоцитов до 0,30m Eq/L после 48 часов, вызывая сильное уменьшение межклеточных липидных капель. Повышают температуру кожи в области живота и бедер, улучшая микроциркуляцию. Также уменьшают склерозирование соединительнотканых оболочек вокруг жировых клеток, известное как эффект «апельсиновой корки» - характерная проблема при целлюлите.

Экстракт коры *Machilus thunbergii* обладает действием антицеллюлитного средства, уменьшает липидную аккумуляцию (дифференциацию адипоцитов), основанную на подавлении PPARs, HSL, LPL, лептина и др.

Экстракт коры магнолии является одним из наиболее эффективных увлажнителей для кожи, а так же обладает заживляющими и регенерирующими свойствами. Она добавит увлажнение коже вне зависимости от атмосферной влажности.

Метилсиланол карбоксиметил теофилин альгинат вызывает эффект липолиза в адипоцитах, который подтверждается результатами экспериментов на адипоцитах в лабораторных условиях; а так же на трофичность и дегенерацию протеогликанов или кислотных мукополисахаридов в эластичных волокнах ткани и коллагене.



Мезорастворы для MTS микронидлинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микронидлинга

- 1 Vital W - *Анти-возрастной уход*
- 2 Vital PS - *Стабилизация пигментации*
- 3 Vital SM - *Лечение растяжек*
- 4 Vital WH - *Заживление ран*
- 5 Vital CL - *Контроль целлюлита*
- 6 Vital HR - *Формула восстановления волос*

PEPTIDE AQUA GEL MASK

Пептидно аквагелевая маска



1 Тип продукта/информация

Увлажняющая успокаивающая маска

2 Описание

MTS пептидная маска была разработана для космецевтического использования, чтобы успокоить и увлажнить кожу после процедуры MTS микронидлинга. Маска была разработана с применением инновационной технологии ТКД (Трансдермальная косметическая доставка), что позволяет эффективным ингредиентам активизироваться от температуры тела. Результатом является быстрое и эффективное проникновение этих ингредиентов в глубокие слои кожи. Маска содержит аминокислоты пептидов, создающих молекулы коллагена; ромашку и другие успокаивающие ингредиенты, которые быстро заживляют поврежденную кожу и улучшают гидробаланс кожи. Эта охлаждающая маска сделает вашу кожу гладкой и увлажненной, способствует ее эластичности и защищает ее от пагубного влияния окружающей среды.

3 Ингредиенты

Вода, ацетил гексапептид-8, экстракт аптечной ромашки, гидролизованный коллаген, динатрия этилендиаминтетраацетат, глицерин, экстракт портулака огородного, маннан, полисорбат 80, гиалуронат натрия, камедь рожкового дерева, дикалия глицирризинат, гидроксид калия, метилпарабен, пропилпарабен, фенокситанол, Blue 1.

4 Ключевые преимущества

- Лучшее средство для завершения процедуры микронидлинга
- Разработана специально для косметологов
- Позволяет увлажнить кожу на 200% больше по сравнению с другими коллагеновыми увлажняющими средствами
- Прекрасное решение для увлажнения
- Уменьшает размер пор, морщины и проявление недостатков кожи
- Не обладает цитотоксичностью, отсутствуют побочные эффекты!

5 Применение

Используйте маску после MTS процедуры.

Извлечь косметическую лечебную маску из серебристой упаковки и аккуратно развернуть.

Аккуратно наложите маску на лицо и расправьте пальцами так, чтобы она плотно прилегла по всей поверхности.

Через 10 - 15 минут снимите маску и удалите излишки жидкости ватным диском, либо оставьте на коже до полного впитывания жидкости.

6 Меры предосторожности

Храните в недоступном для детей месте.

STEM CELL/PEPTIDE/EGF

Необходимый уход при прохождении процедур MTS-Роллером



Революционная комбинация запатентованных стволовых клеток растительного происхождения с инновационными активными ингредиентами и омолаживающими пептидами, с увлажняющим и осветляющим эффектами.

MTS StemPer сыворотка и увлажнитель содержат концентрированные белки для возвращения коже молодости, уплотняют, убирают провисания усталой кожи, сокращают глубокие и мелкие морщины, улучшая общий вид кожи. Также прекрасно подходят в качестве постлазерного ухода, IPL, процедур мезонидлинга MTS.

Ключевые преимущества:

- Борется с признаками старения путем защиты ваших естественных стволовых клеток кожи, откладывая процесс старения важных клеток.
- Благодаря максимально возможной гидратации кожи, уменьшает видимость глубоких и мелких морщин.
- Защищает жизненную силу и молодость кожи.
- Питает и оживляет клетки, сохраняя их форму и упругость. Естественно поддерживает «усталый» коллаген и восстанавливает клетки.
- Видимый результат омоложения кожи наблюдается через 2 недели; на 15% за 30 дней, и результат будет только улучшаться со временем!
- Липосомальная доставка заменяет старые клетки стволовыми клетками растительного происхождения. Освобождает мощные антиоксиданты для борьбы со свободными радикалами в клетках.

Применение:

Используйте небольшое количество MTS StemPer сыворотки и наносите после процедуры микронидлинга. После используйте MTS StemPer увлажнитель.

Меры предосторожности: Только для профессионалов. Только для наружного применения.

Ингредиенты:

Деионизированная вода, экстракт культуры клеток листьев рододендрона, экстракт культуры клеток яблони, пропандиол, C14-22 спирт и C12-20 алкилглюкозид, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, L-аскорбиновая кислота, магния аскорбил фосфат, альфа арбутин, циклометикон, диметикон, гиалуронат натрия, пантенол, олигопептид-1, гидролизованный пшеничный протеин, гидролизованный гороховый протеин, сквалан, керамид 3, миристоил пентапептид-8, миристоил пентапептид-11, миристоил гексапептид-4, экстракт корня солодки, экстракт листьев лечебной ромашки, экстракт листьев розмарина, экстракт центеллы азиатской, этилгексилглицерин.



MTS SUN PROTECTIVE CREAM

MTS солнцезащитный крем



1 Тип продукта / информация

ДНК-восстановление SPF30

2 Описание

Не содержащий «химии» солнцезащитный крем является легчайшим средством. Содержит силиконовый эластомер. Данная структура позволяет достичь шелковистости при использовании на коже лица. В дополнение этот продукт не содержит агрессивных или сомнительных УФ-отражающих агентов и не оставляет белого налета, который может появиться при использовании других солнцезащитных кремов. Дополнен запатентованными липопептидами, стимулирующими синтез коллагена и эластина с минимальной выработкой простагландина.

3 Ингредиенты

Диоксид титана, оксид цинка, циклопентасилоксан, циклометикон, диметикон кроссполимер, диметикон / винил диметикон кроссполимер, трибегенин, бегенат кальция, сорбитан изостеарат, диметиконол, оксид алюминия, миристоил гексапептид-5, PEG-10 диметикон, метикон, оксид железа.

4 Ключевые преимущества

- Разработан специально для профессионалов - специалистов по уходу за кожей
- Рекомендован для всех типов кожи
- Содержит уникальный силиконовый эластомер
- Рекомендован и безопасен в использовании после клинических процедур, особенно после микронидлинга
- Может быть использован в качестве основы под макияж
- Без альбумина; не имеет отбеливающего эффекта
- Не цитотоксичен, не вызывает аллергии, нет побочных эффектов!

5 Показания по применению

Нанесите необходимое количество на кожу лица и шеи.

MTS STERILIZING SOLUTION

Стерилизующий раствор для мезороллеров MTS



1 Тип продукта/информация

MTS процедурный продукт
Раствор для очищения и стерилизации.

2 Описание:

Флакон со стерилизующим раствором, контейнером для очищения и щеточкой.

3 Состав:

Изопропиловый спирт 99%, вода.

4 Показания к применению:

- Стерилизация MTS-Роллеров.
- Антисептическая обработка поверхности кожи.
- Используя щеточку, очистите роллер под струей теплой воды.
- Нанесите стерилизующий раствор непосредственно на барабан MTS-Роллера и на спонж лотка. Хорошо пропитайте спонж.
- Проводите роллером несколько раз по спонжу в лотке. Следите за тем, чтобы все иглы погружались в спонж и соприкасались с раствором. Если необходимо промойте роллер под струей теплой воды.
- Дождитесь полного высыхания роллера (в течение 10 - 20 минут).
- Положите роллер обратно в контейнер.

5 Меры предосторожности:

Только для наружного применения. Огнеопасно. Хранить вдали от огня. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас имеются ранки, укусы насекомых, серьезные ожоги или прочие повреждения кожи. При использовании продукта избегайте попадания в глаза. Не используйте на большой поверхности тела. Не используйте более чем 1 раз неделю, если это не было прописано вашим врачом. Прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом, если состояние не меняется или ухудшается. Храните в недоступном для детей месте. При возникновении симптомов аллергии прибегните к медицинской помощи или обратитесь к помощи токсикологического центра. Не используйте на раздраженной коже или если кожа сильно воспалена. Избегайте попадания в глаза или на слизистые.

MTS ANTI-AGING COMPLEX

MTS Анти-возрастной комплекс (набор)

1 Тип продукта/информация

MTS набор косметических средств для лица

2 Описание

В большинстве случаев способность проникновения активных ингредиентов через эпидермальный барьер (роговой слой) и через межклеточные каналы составляет примерно 0.3% и зависит от степени кератинизации. Но даже это количество проникающих активных ингредиентов не всегда может быть предсказуемым.

Новая концепция состоит в том, чтобы увеличить проникновение через эпидермис путем создания нового транс-клеточного пути и сконструировать новую систему доставки лечебных компонентов.

Данный MTS Анти-возрастной комплекс предоставляет оригинальный и самый эффективный метод омоложения кожи для достижения вашей идеальной красоты.

3 Состав комплекса

- 1 MTS VitaPer сыворотка (30мл.) - Поливитамины и Пептидный уход
- 1 MTS роллер (CR2: 0.2 мм) - Новая эра омоложения кожи; 200 микроигл
- 1 MTS пептидная маска - Новейший усилитель увлажнения в ночное время
- 1 MTS пептидный крем (30 мл) - Регенерация, гидратация, разглаживающий комплекс
- 1 MTS солнцезащитный крем (30 мл) - Восстановитель ДНК с SFP30

Необходим набор для стерилизации роллера (приобретается отдельно)

- 1 MTS очищающий лоток для роллера
- 1 MTS очищающая щеточка для роллера
- 1 MTS стерилизующий раствор (180 мл)

4 Ключевые преимущества

Изначально разработан для косметологов

- Для поддержания эффекта процедур микронидлинга в домашних условиях.
- Улучшает текстуру кожи, выравнивает тон и сужает поры.
- Подтягивает кожу лица.
- Оказывает эффект легкого пилинга.
- Уплотняет кожу.
- Отбеливает, стабилизирует пигментацию.
- Сокращает морщины.

5 Применение

1. Шаг первый – Активизация:

MTS VitaPer Сыворотка

2. Шаг второй – Коррекция:

MTS-Роллер

3. Шаг третий – Гидратация:

MTS пептидная маска/ MTS пептидный крем

4. Шаг четвертый – Защита:

MTS солнцезащитный крем

5. Шаг пятый – Стерилизация:

MTS Стерилизующий раствор



MTS HAIR RESTORATION COMPLEX

MTS Комплекс для восстановления волос (набор)

1 Тип продукта/информация

MTS Комплекс для восстановления волос (набор)

2 Описание

Применяется в системе микронидлинга - наиболее эффективного механизма трансдермальной доставки активных ингредиентов в глубокие слои кожи.

В отличие от других косметических средств, MTS Пептидный комплекс для восстановления волос предлагает абсолютно инновационный путь омоложения кожи волосистой части головы. MTS-Роллер (модель 0.2 мм, входит в комплект), усиливает действие MTS комплекса в более глубоких слоях кожи, именно там, где формируются ее основные проблемы.

MTS Пептидный комплекс для восстановления волос - первый и единственный продукт этого класса для направленной стимуляции фазы анагена волосяного фолликула с содержанием факторов роста для волос.

Использование этих разработок и нашего опыта в области биохимии пептидов предлагает новое начало в технологии восстановления волос для мужчин и женщин.

3 Состав комплекса

2 MTS Пептидных HR лосьона (100мл) - Поливитаминный и пептидный уход

1 MTS-Роллер (CR2: 0.2мм) - Новая эра омоложения кожи; 200 микроигл

Необходим набор для стерилизации (приобретается отдельно)

1 MTS очищающий лоток для роллера

1 MTS очищающая щеточка для роллера

1 MTS стерилизующий раствор (180 мл)

4 Ключевые моменты

- За восемь недель 100% мужчин, применявших процедуру с MTS комплексом восстановления волос, заметили увеличение роста волос и в среднем на 80% уменьшение потери волос.
- 12-недельные исследования выявили уменьшение количества вырабатываемого кожного сала у 62% испытуемых, применявших MTS Пептидный HR комплекс.

5 Применение

1. Шаг первый – Активизация:

2. Шаг второй – Коррекция:

3. Шаг третий – Максимализация эффекта:

4. Шаг четвертый – Стерилизация:

MTS Пептидный комплекс для восстановления волос

MTS-Роллер

Повторите шаг первый

MTS Стерилизующий раствор



MTS PEPTIDE HR COMPLEX

MTS Пептидный лосьон для восстановления роста волос



1 Описание

Максимальное восстановление роста волос с полипептидами и MTS-Роллером.

MTS Пептидный лосьон для восстановления роста волос - это первый и единственный в своем классе продукт, который направленно стимулирует фазу анагена в цикле роста волос, снабжая волосы необходимыми факторами роста. Данный продукт также укорачивает фазы катагена и телогена жизненного цикла волосяного фолликула.

2 Ингредиенты

Деионизированная вода, экстракт водорослей, фенокситанол, пропиленгликоль, глицерин, экстракт мелии, гидролизат молочного протеина, экстракт картофеля, силанедиол салицилат, бутиленгликоль, триэтанолламин, серосодержащие аминокислоты, экстракт сульфомукополисахаридов, экстракт метельчатой бирючины, коллоидная сера, экстракт Spondios amara, экстракт ягод ежевики, экстракт китайской полыни, гомотаурин, экстракт папоротника Adiantum, экстракт хны, экстракт баросмы, бензоат натрия, сорбат калия, полипептиды (лейцин, пролин, лизин, глутамин, аспартамовая кислота, метионин, аланин).

3 Ключевые преимущества

- Изначально разработан специально для косметологов
- Через 8 недель использования MTS Пептидного лосьона, 100% мужчин отметили увеличение роста волос и, в среднем, на 80% уменьшение выпадения волос.
- 12 недель исследований показали 62% уменьшения выработки кожного сала у испытуемых, использующих MTS Пептидный лосьон для восстановления роста волос.
- MTS Пептидный лосьон для восстановления роста волос уменьшает популяцию демодекса в среднем на 32%.
- Заметное сокращение выпадения волос уже через одну неделю.
- Безопасен, побочные эффекты не выявлены.
- Усиливает рост новых волос уже через 3 месяца.

4 Применение

Нанесите лосьон на кончики пальцев, затем на обрабатываемую зону кожи головы, за 1-2 часа до сна, чтобы дать коже головы необходимое время для абсорбции продукта. Энергично втирайте лосьон в кожу головы в течение 2-3 минут. После применения, вымойте руки. Применяйте лосьон, как минимум, за четыре часа перед ее мытьем. Необходимо использовать ежедневно.

MTS LASHPEP

MTS Кондиционер для ресниц с реконструирующей пептидной формулой

Не содержит парабенов | без отдушек | подходит для чувствительной кожи | без медикаментов

Перед тем, как представить вам наш продукт, мы хотели бы указать на факт, что большинство представленных на рынке средств для роста ресниц являются медикаментозными.

*Данный продукт не является лекарством и не обладает какими-либо побочными эффектами, имеющихся у прочих продуктов для стимуляции роста ресниц. MTS Кондиционер для ресниц содержит косметически одобренный, высоко концентрированный и запатентованный пептид, активирующий сигнал роста ресниц.

Преимущества:

Нанесите продукт на ваши ресницы и наблюдайте, как они будут расти! Тонкие, ломкие, стареющие ресницы, наконец-то, примут достойный вид. MTS Кондиционер для ресниц питает и оживляет ваши ресницы и брови в то время, пока вы спите, кардинально улучшая вид ваших ресниц, их длину, толщину и объем благодаря запатентованной и высокотехнологичной комбинации пептидов и других активных ингредиентов.

1. Реконструирующие пептиды стимулируют производство кератинового белка.
2. Результаты in-vivo: Удлинение и утолщение ресниц у ВСЕХ испытуемых в панели, в возрасте 24-82 лет. Тестировался MTS Кондиционер для ресниц с 20% концентрацией активного пептида. Участники использовали средство один раз в день.
3. Увеличение длины и толщины ресниц на 25% после 3-4 недель использования.
4. Реконструирующие пептиды делают сильнее и кондиционируют волосяные фолликулы, предотвращая выпадение ресниц и позволяя им достигнуть своей максимальной длины. Ваши ресницы выглядят объемными и длинными, как никогда!
5. Стимулируя активацию производства аминокислот богатых белком и усиливая циркуляцию крови, обогащенной кислородом MTS Кондиционер для ресниц позволяет добиться видимых результатов в сравнительно короткие сроки!
6. Антиоксиданты состава борются с негативным эффектом, оказываемым свободными радикалами, ослабляющими волосы и вызывающими их ломкость.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Только для наружного применения. Если наблюдается раздражение или аллергическая реакция кожи, немедленно смыть водой и прекратить использование. Проконсультируйтесь с терапевтом, в случае если воспаление или аллергическая реакция сохраняется.

Применение:


Используйте дважды в день. Утром и перед тем, как лечь спать, наносите на чистые сухие ресницы. Нанесите небольшое количество кондиционера для ресниц на линию роста верхних ресниц (как если бы вы использовали жидкую подводку для глаз). Дождитесь полного высыхания прежде, чем использовать другие косметические препараты. Рекомендуется продолжать использовать один раз в неделю, для поддержания достигнутой формы и состояния ресниц. Пептидный кондиционер для ресниц не предназначен для прямого контакта со слизистой глаза. При попадании средства в глаза, промойте их обильным количеством воды.

Рекомендация по использованию кисточки:

Используйте тонкой линией на линии роста ресниц, как если бы вы использовали подводку для глаз, дважды в день. В течение 4-6 недель наблюдайте, как меняются ваши ресницы и ваш взгляд!



Потрясающий результат за 28 дней!

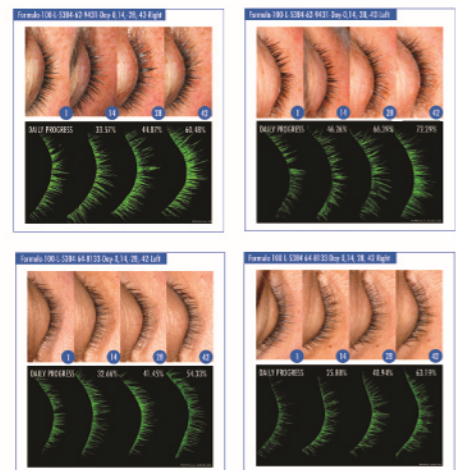

POREX MASK

Органическая маска для сужения пор/отшелушивающая маска



Тыква богата органическими активными ингредиентами: витаминами, аминокислотами и ферментами, известными своими антиоксидантными и отшелушивающими свойствами. Ценные компоненты данного препарата, извлеченные из тыквы, помогают бережно ремоделировать и отшелушивать кожу. Улучшают ее внешний вид, уменьшая видимость мелких морщин, возрастных пятен, веснушек, делая кожу гладкой. Не только сужают поры и борются с несовершенствами кожи, стимулируют рост новых здоровых клеток кожи.

Применение

Нанесите на чистую кожу, избегая попадания на кожу вокруг глаз. Оставьте на коже 8 минут (для сухой, зрелой или чувствительной кожи) или 15 минут (для жирной или проблемной кожи). Смойте теплой водой. Используйте один или два раза в неделю.

Ингредиенты

Алоэ вера гель, экстракт тыквы, глицерин, экстракт ромашки, гликозаминогликан, ферменты бромелин и папаин, лецитин, гуаровая камедь, натрий PCA, экстракт дрожжей, морковное масло, масло морской крушины, феноксиэтанол, альгинат натрия, экстракт морских водорослей, матриксил 3000, гиалуронат натрия, оксид железа, лимонная кислота, молочная кислота.

Меры предосторожности

Возможно ощущение небольшого жжения. Если на коже появилось раздражение, немедленно смойте теплой водой. Всегда тестируйте продукт на небольшом участке кожи, перед использованием на всей поверхности лица. Используйте согласно инструкции. Не используйте если у вас очень чувствительная кожа или имеется раздражение. Не используйте при розовых угрях, открытых нарывах или других кожных заболеваниях. Не используйте во время прохождения процедуры химического пилинга или после нее. Избегайте попадания препарата в глаза или в зону слизистой. Храните в недоступном для детей месте.

MTS VITAPEP SERUM

MTS Сыворотка с витапептидами



1 Описание

Сыворотка мгновенно увеличивает уровень увлажненности кожи и усиливает ее сопротивляемость негативным факторам окружающей среды. В ее состав входит значительное количество витамина С (28%), который является сильным антиоксидантом. Улучшает тон кожи лица, увлажняет, делает кожу шелковистой и сияющей. Сыворотка обеспечивает разглаживающий, антиоксидантный эффект; придает сияние и создает защиту для всех типов кожи, на которой начинают проявляться признаки старения. Продукт поможет сформировать дышащий, увлажняющий слой и поможет достигнуть гладкости даже при использовании с макияжем. Гиалуроновая кислота улучшает проникновение активных веществ и увлажняет кожу. Витамин С, содержащийся в продукте, обладает гидрофильными и липофильными свойствами.

2 Ингредиенты

Циклопентасилоксан, диметикон, диметикон/винил диметикон кросполимер, изододекан, диметикон (и) циклометикон, каприл/триглицерид каприл, линолиевая кислота, стеролы глицина сои (соевых бобов), фосфолипиды, тетрагексилдецил аскорбат, токоферол, ретинол, аскорбиновая кислота, растворимый коллаген, метилпарабен, пропилпарабен, гиалуроновая кислота, арбутин, глицерин (и) бутиленгликоль (и) вода (и) карбомер (и) полисорбат-20 (и) пальмитоил олигопептид (и) пальмитоил тетрапептид-7.

3 Ключевые моменты

- Разработан специально для косметологов.
- Разработан специально для процедур микронидлинга.
- Содержит дружественные коже ингредиенты.
- Не цитотоксичен, не вызывает аллергии, отсутствуют побочные эффекты!

4 Показания по применению

Нанесите необходимое количество препарата на область лица и шеи до и после использования MTS-Роллера.

5 Меры предосторожности

Храните в недоступном для детей месте.

MTS PEPTIDE MOISTURIZER

MTS Пептидный увлажняющий крем



1 Описание

MTS Увлажняющий крем с пептидами - ваш помощник в обновлении кожи; он поможет ей выглядеть свежей, здоровой и постепенно уменьшит видимость глубоких и мелких морщин. Обогащен натуральными ингредиентами, такими как алоэ; редкими маслами. Содержит аминокислоты, которые, как показали клинические исследования, уменьшают видимость морщин до 57%. Данный крем нормализует уровень увлажненности, доставляет необходимое количество влаги в кожу после процедуры микронидлинга MTS.

Особые антиоксиданты в составе удаляют свободные радикалы; восстанавливая и предотвращая повреждения клеток. MTS Пептидный увлажняющий крем уменьшает поверхностные и глубокие морщины без особого труда.

2 Ингредиенты

Алоэ, сок листьев барбариса, вода, цетиловый спирт, пропиленгликоль, ланолиновый спирт, полисорбат-80, стеариновая кислота, глицерил стеарат, пролин, лизин, глицин, этилендиаминтетраацетат натрия, пропилпарабен, имидазолидинил мочевины, аденозин.

3 Ключевые моменты

- Разработан специально для косметологов.
- Доказана способность средства улучшать дыхание кожи и усиливать потребление кислорода на клеточном уровне.
- Клинически доказанные результаты активизации обновления клеток.
- Стимулирует обновление клеток кожи до 25% за две недели.
- Видимо уменьшает морщины и общие возрастные признаки.
- Конечный результат позволяет выглядеть значительно моложе, кожа становится более гладкой.
- Рекомендовано для нормального и жирного типов кожи.

3 Применение

Используйте после процедуры микронидлинга MTS, наносите на кожу лица и шеи.

4 Меры предосторожности

Храните в недоступном для детей месте.

NUMB MASTER

Крем для местной анестезии
для процедур микроиндинга



1 Описание

- За счет реализованного в препарате липосомального инкапсулирования обеспечивается глубокое проникновение лидокаина в эпидермальный и дермальный слои, там, где находятся чувствительные волокна (рецепторы боли).
- Продолжительная анестезия: эффект длится около часа.
- Эффект потери чувствительности начинается в течение 20-25 минут.
- Немагная текстура крема позволяет легко его удалить.
- В упаковке содержится 118 грамм.

2 Активные ингредиенты

Лидокаин 9,6%

3 Вспомогательные ингредиенты

Вода, натрия полиакрилат, гидрогенизированный полидецен, трицетед-10, неопентил гликоль полиакрилат/дикапрат, лецитин, холестерин, пропиленгликоль, бензиловый спирт, этоксилигликоль, карбомер, триэтаноламин.

4 Меры предосторожности

Только для наружного использования.

- Не используйте этот продукт в течение беременности, кормления грудью и при диабете.
- Превышение дозировки либо короткие интервалы между применениями могут проявиться в серьезных побочных

эффектах. Пациенты должны быть проинструктированы строго придерживаться показаний к применению, рекомендованных лечащим врачом и должны применять продукт под его наблюдением.

- У части пациентов может проявиться аллергическая реакция на ингредиенты этого продукта.
- Прекратите использование продукта и обратитесь к врачу в случае появления раздражения, покраснения, отека, затуманенного зрения, припадков, сонливости, смятения, неравномерного сердцебиения и любого другого типа побочных эффектов или необычных симптомов.
- Хранить в недоступном для детей месте; в случае случайного проглатывания немедленно обратиться к врачу.

5 Применение

- Очистить зону обработки мягким мылом и теплой водой, тщательно промыть. Промокнуть влагу полотенцем или салфеткой перед нанесением данного продукта.
- Для детей старше 12 лет и взрослых: наносить продукт на зону воздействия до 6 раз в течение одного дня.
- Для детей младше 12 лет: требуется консультация у врача.
- Использовать продукт только в профессиональных целях.
- Не использовать с окклюзией.



Мезорастворы для MTS микроиндинга

Клинические мезорастворы для применения в процедуре медицинского микроиндинга

- 1 Vital W - Анти-возрастной уход
- 2 Vital PS - Стабилизация пигментации
- 3 Vital SM - Лечение растяжек
- 4 Vital WH - Заживление ран
- 5 Vital CL - Контроль целлюлита
- 6 Vital HR - Формула восстановления волос


**Результаты некоторых клинических исследований
с применением медицинского микронидлинга
и мезотерапевтических растворов Clinical Resolution**



CLINICAL RESOLUTION 



MTS-ROLLER
MICRONEEDLE THERAPY SYSTEM

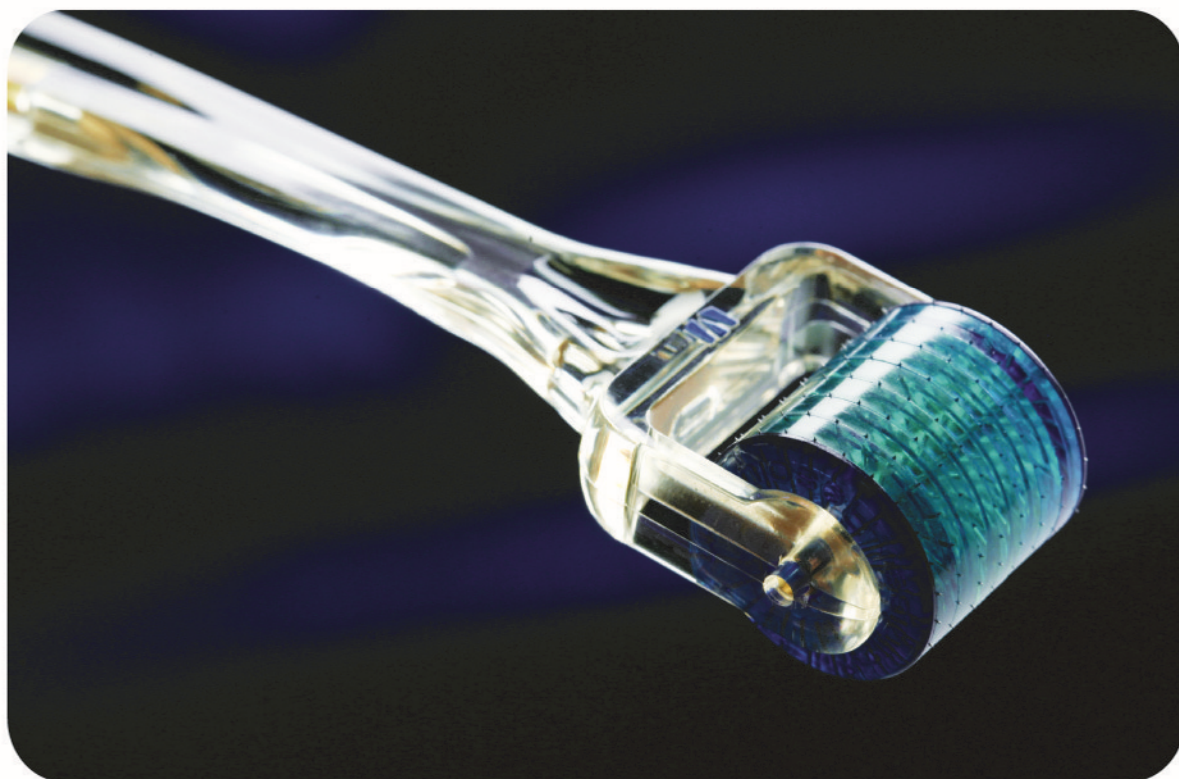

Клинические программы с применением факторов роста и пептидных комплексов

- **Омоложение, биоревитализация**
- **Стабилизация пигментации**
- **Лечение растяжек**
- **Репарация тканей, лечение рубцов**
- **Лечение целлюлита**
- **Предотвращение выпадения и стимулирование роста волос**

Производство США. Сертифицировано FDA.



Эксклюзивный дистрибьютор продукции CLINICAL RESOLUTION и MTS-ROLLER в России и странах СНГ – ООО «Корнеаль»
115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, 17 - 106; тел./факс: +7 495 664 25 27

info@corneal.ru www.corneal.ru



Эксклюзивный дистрибьютор в России - ООО "Корнеаль":
115035, Москва, Садовническая набережная, д. 17, офис 106;
тел./факс: +7 495 664 2527; +7 495 664 2529
info@corneal.ru

www.corneal.ru



MTS-ROLLER
MICRONEEDLE THERAPY SYSTEM

CLINICAL RESOLUTION 